



HYBRIX-U

HYBRIX-U

Technology Innovation

- ・適応症例：尺骨遠位端骨折
- ・適応除外：尺骨骨幹部骨折
変形矯正骨切術



Compatibility

日本人の骨CTから得られた解析結果を基に
日本人に適したアノミカルデザインを採用




Standard

Long

Strong Subchondral Support

PolyaxialScrewの3つのロッキング機構から得られる
強固で確実な軟骨下骨支持

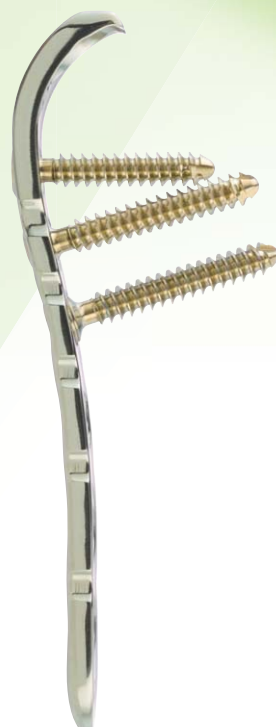

Hook Screw and Pin

茎状突起骨片を固定する専用のスクリューとピン



Hook Screw




Hook Pin



User-friendly instrument

術者の操作性を考慮した手術器具

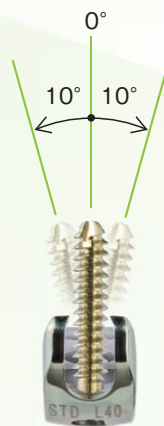

Angle of the Polyaxial Screw


PolyaxialScrewは、 0° のニュートラルモードと左右 10° までのフリーモードが選択可能



Implant

Long

Standard

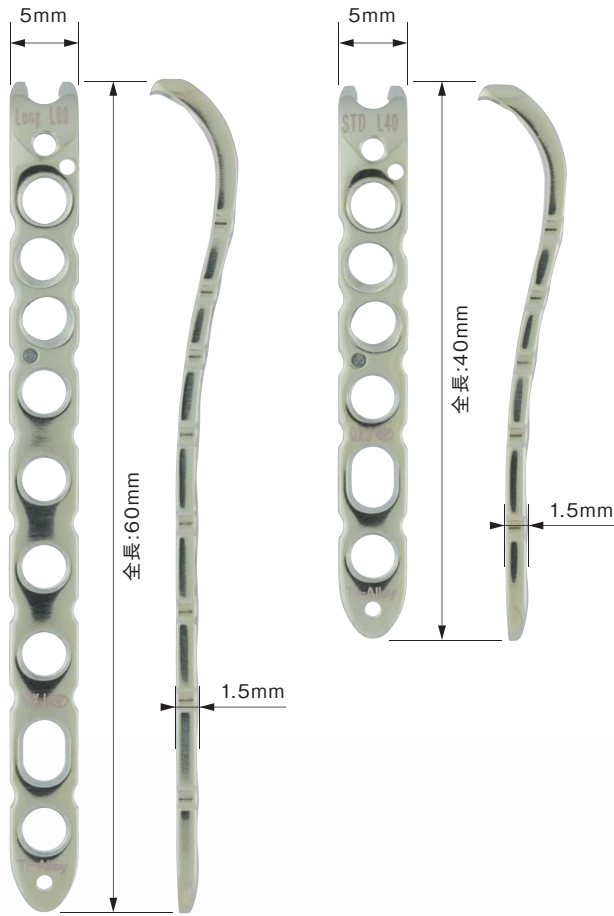

フックピン


フックスクリュー



ポリアクシャル

モノアクシャル

コーティカル

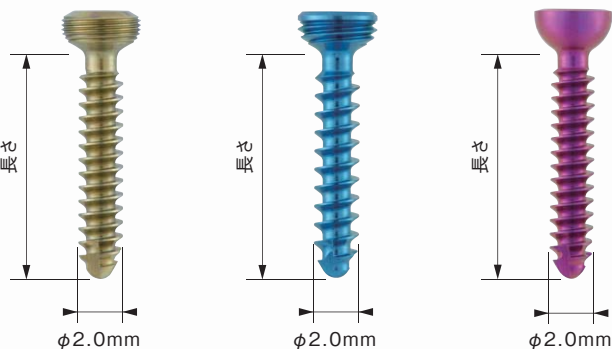

HYBRIX尺骨プレート

承認番号：23000BZX00095000

商品名	全長(mm)	商品コード	JANコード	クラス分類
HYBRIX尺骨プレート スタンダード40mm	40	11-982-01	4946329326734	Ⅲ
HYBRIX尺骨プレート ロング60mm	60	11-982-02	4946329326741	

HYBRIX尺骨フックピン

承認番号：23000BZX00095000

チタン合金

商品名 (直径×長さ)	商品コード	JANコード	クラス分類
HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×8mm	11-983-08	4946329326772	Ⅲ
HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×9mm	11-983-09	4946329326789	
HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×10mm	11-983-10	4946329326796	
HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×11mm	11-983-11	4946329326802	
HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×12mm	11-983-12	4946329326819	
HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×13mm	11-983-13	4946329326826	
HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×14mm	11-983-14	4946329326833	

HYBRIX尺骨フックスクリュー

承認番号：23000BZX00095000

チタン合金

商品名 (直径×長さ)	商品コード	JANコード	クラス分類
HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×8mm	11-984-08	4946329326901	Ⅲ
HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×9mm	11-984-09	4946329326918	
HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×10mm	11-984-10	4946329326925	
HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×11mm	11-984-11	4946329326932	
HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×12mm	11-984-12	4946329326949	
HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×13mm	11-984-13	4946329326956	
HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×14mm	11-984-14	4946329326963	

HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー

承認番号：23000BZX00095000

チタン合金

商品名 (直径×長さ)	商品コード	JANコード	クラス分類
HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×10mm	11-985-10	4946329327076	Ⅲ
HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×11mm	11-985-11	4946329327083	
HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×12mm	11-985-12	4946329327090	
HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×13mm	11-985-13	4946329327106	
HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×14mm	11-985-14	4946329327113	
HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×15mm	11-985-15	4946329327120	
HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×16mm	11-985-16	4946329327137	
HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×17mm	11-985-17	4946329327144	
HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×18mm	11-985-18	4946329327151	
HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×19mm	11-985-19	4946329327168	
HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×20mm	11-985-20	4946329327175	

HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー

承認番号：23000BZX00095000

チタン合金

商品名 (直径×長さ)	商品コード	JANコード	クラス分類
HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×7mm	11-986-07	4946329327199	Ⅲ
HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×8mm	11-986-08	4946329327205	
HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×9mm	11-986-09	4946329327212	
HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×10mm	11-986-10	4946329327229	
HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×11mm	11-986-11	4946329327236	
HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×12mm	11-986-12	4946329327243	
HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×13mm	11-986-13	4946329327250	
HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×14mm	11-986-14	4946329327267	
HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×15mm	11-986-15	4946329327274	
HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×16mm	11-986-16	4946329327281	
HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×17mm	11-986-17	4946329327298	
HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×18mm	11-986-18	4946329327304	

HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー

承認番号：23000BZX00095000

チタン合金

商品名 (直径×長さ)	商品コード	JANコード	クラス分類
HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×7mm	11-987-07	4946329327342	Ⅲ
HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×8mm	11-987-08	4946329327359	
HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×9mm	11-987-09	4946329327366	
HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×10mm	11-987-10	4946329327373	
HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×11mm	11-987-11	4946329327380	
HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×12mm	11-987-12	4946329327397	
HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×13mm	11-987-13	4946329327403	
HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×14mm	11-987-14	4946329327410	
HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×15mm	11-987-15	4946329327427	
HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×16mm	11-987-16	4946329327434	
HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×17mm	11-987-17	4946329327441	
HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×18mm	11-987-18	4946329327458	

※インプラントはすべて滅菌包装です。


※各インプラントをご使用の際は、必ず添付文書をお読みください。



※写真はインストゥルメントケースを使用した場合の収納例です。


HYBRIX尺骨インストゥルメント

	商品名	商品コード	JANコード	セット 個数	クラス 分類	製造販売届出番号
①	HYBRIX尺骨 トライアル スタンダード40mm	21-982-01	4946329350418	1	I	13B1X00306G11046
②	HYBRIX尺骨 トライアル ロング60mm	21-982-02	4946329350425	1		13B1X00306G11046
③	HYBRIX尺骨 フック用仮固定ピンφ1.4 / 100mm	21-982-03	4946329350432	2		13B1X00306G11047
④	HYBRIX尺骨 フックピンガイドφ1.4	21-982-04	4946329350449	1		13B1X00306G11048
⑤	HYBRIX尺骨 フックピンゲージφ1.4	21-982-05	4946329350456	1		13B1X00306G11049
⑥	HYBRIX尺骨 ブロックガイド スタンダード40mm	21-982-06	4946329350463	1		13B1X00306G11050
⑦	HYBRIX尺骨 ブロックガイド ロング60mm	21-982-07	4946329350470	1		13B1X00306G11050
⑧	HYBRIX尺骨 固定ボルト	21-982-08	4946329350487	1		13B1X00306G11051
⑨	HYBRIX尺骨 ブロックガイドドライバー-T6	21-982-09	4946329350494	1		13B1X00306G11052
⑩	HYBRIX尺骨 ワンホールガイドドライバー	21-982-10	4946329350500	1		13B1X00306G11053
⑪	HYBRIX尺骨 モノアクシャルワンホールガイドφ1.4	21-982-11	4946329350517	2		13B1X00306G11054
⑫	HYBRIX尺骨 ワンホールガイド用ゲージ付ドリルガイドφ1.4	21-982-12	4946329350524	1		13B1X00306G11054
⑬	HYBRIX尺骨 マルチドリルガイドφ1.4	21-982-13	4946329350531	1		13B1X00306G11055
⑭	HYBRIX尺骨 マーク付ドリルφ1.4 / 100mm	21-982-14	4946329350548	2		13B1X00306G11056
⑮	HYBRIX尺骨 デプスゲージ止め穴用±0mm	21-982-15	4946329350555	1		13B1X00306G11057
⑯	HYBRIX尺骨 デプスゲージ通し穴用±0mm	21-982-16	4946329350562	1		13B1X00306G11057
⑰	HYBRIX尺骨 ドライバーシャフトT6	21-982-17	4946329350579	2		13B1X00306G11058
⑱	HYBRIX尺骨 骨ネジドライバーハンドル	21-982-18	4946329350586	1		13B1X00306G11058
⑲	HYBRIX尺骨 トルクドライバーハンドル / 0.4Nm	21-982-19	4946329350593	1		13B1X00306G10891
⑳	HEARTY ワンホールガイドハンドル	01-930-90	4946329191141	1		13B1X00306G10390
㉑	HYBRIX尺骨 スクリュー計測ゲージ	21-982-20	4946329350609	1		-
㉒	HYBRIX尺骨 インストゥルメントケース	21-982-99	4946329350616	1	-	

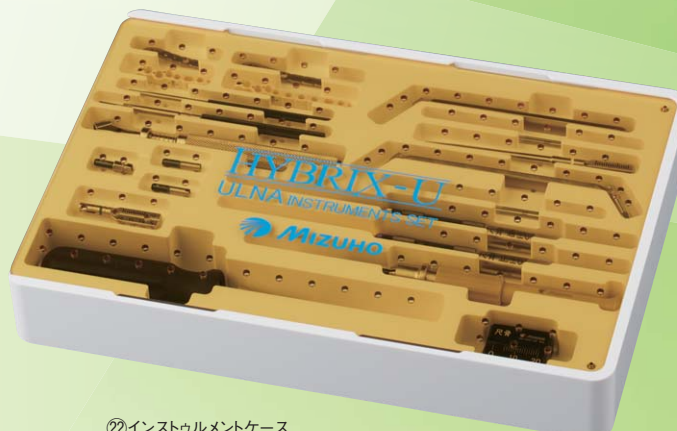


㉒インストゥルメントケース

Simple instruction manual

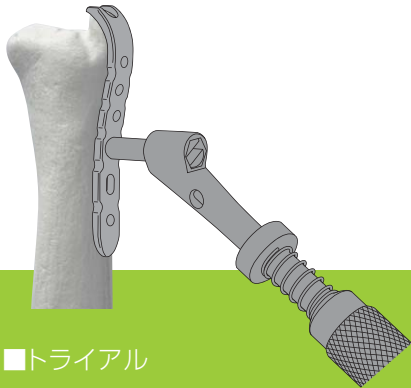


■トライアル

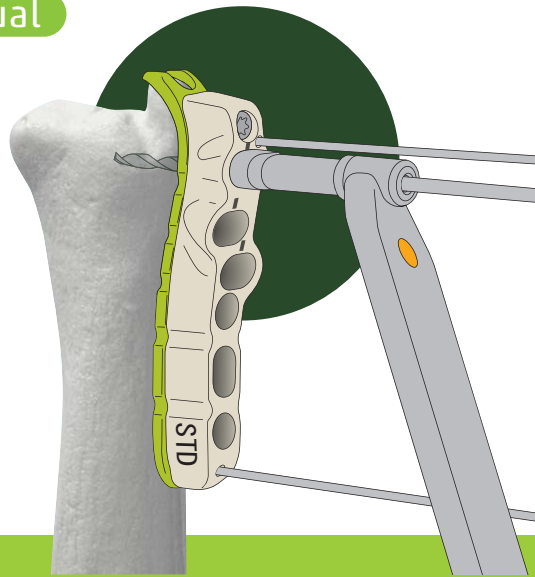


■プレート遠位部のドリリング

遠位1~3穴はポリアクシャルホールを採用。ポリモード、ニュートラルモードが選択できます。

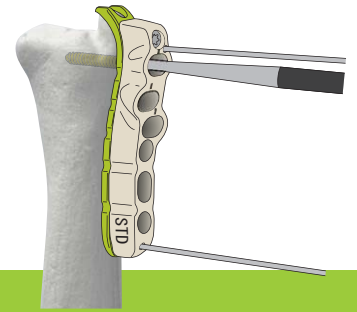


■ポリアクシャルスクリューの挿入・固定

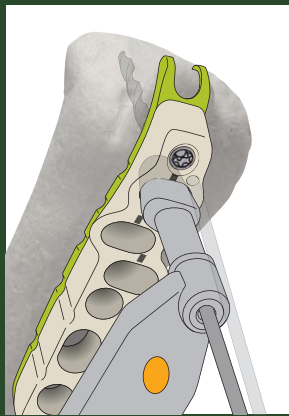



【ニュートラルモード】

マルチドリルガイドのポリ・ニュートラル用(ア)を使用する場合

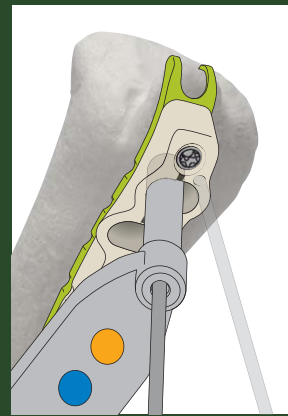


【ポリモード】

マルチドリルガイドのポリ・フリー用(イ)を使用する場合

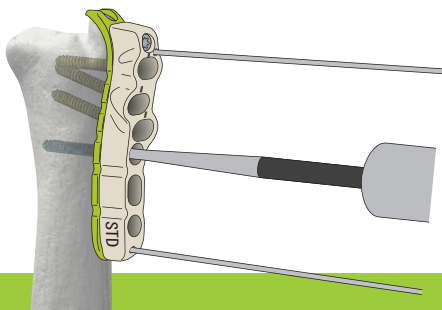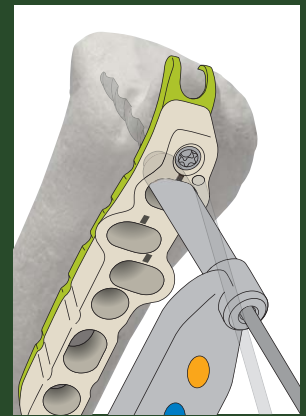


■モノアクシャルスクリュー挿入・固定

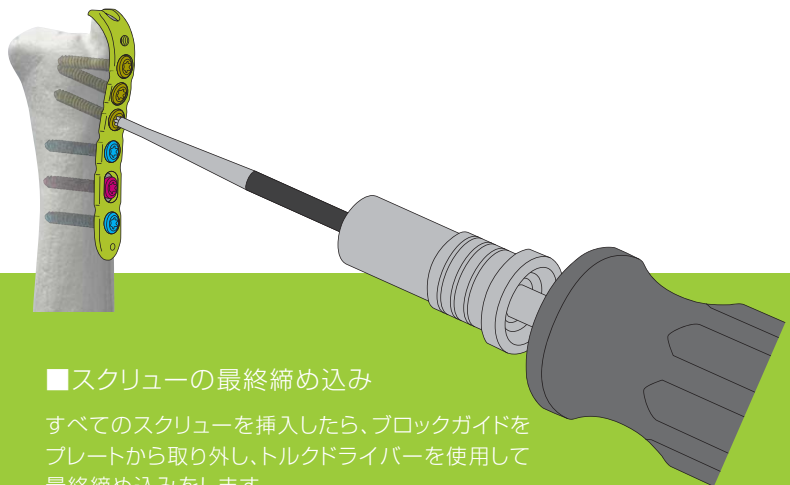

■スクリューの最終締め込み

すべてのスクリューを挿入したら、ブロックガイドをプレートから取り外し、トルクドライバーを使用して最終締め込みをします。

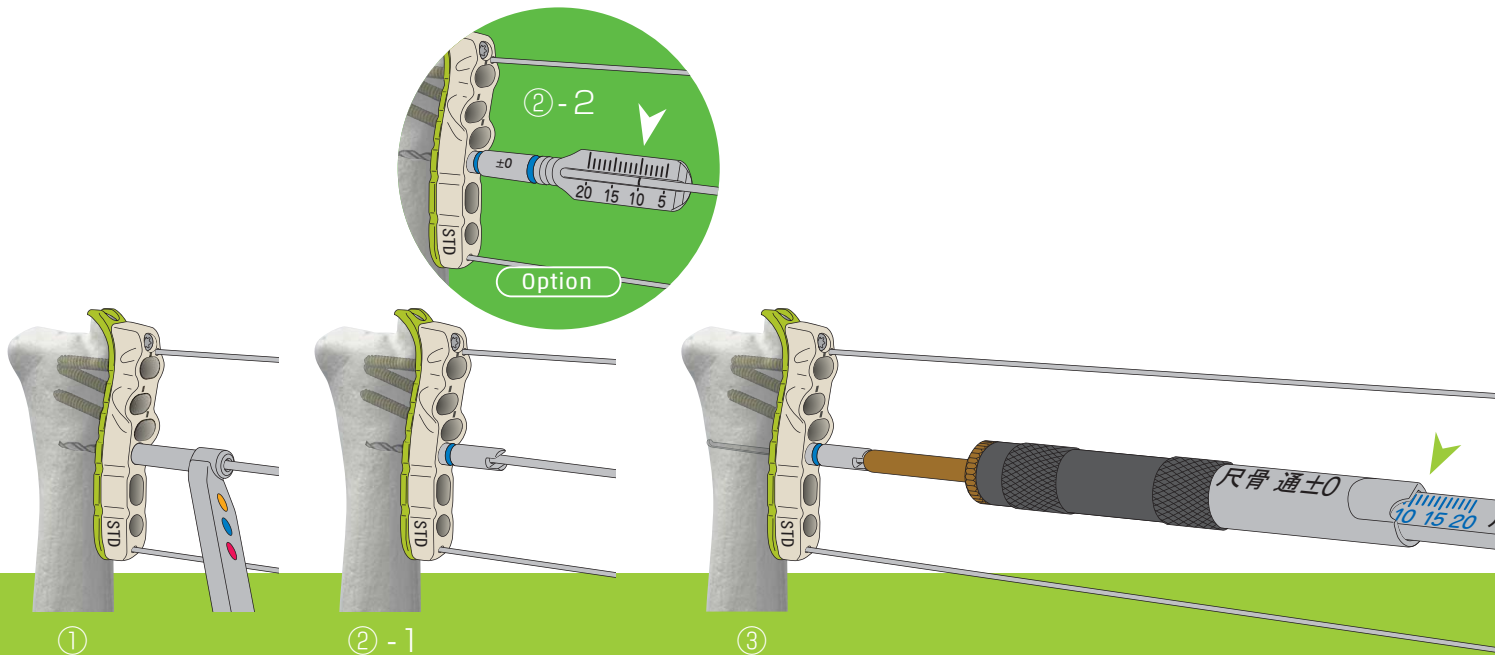

■プレート骨幹部(近位)のドリリング

コーティカルスクリューを固定する場合

①マルチドリルガイドのポリ・フリー用を使用しドリリングを行います。

モノアクシャルスクリューを固定する場合

②-1 モノアクシャルワンホールガイドを装着しドリリングを行います。

②-2 ワンホールガイド用ゲージ付ドリルガイドを用いることで簡易計測が可能です。 **Option**

■スクリューサイズの計測

③デプスゲージ通し穴用を用いて計測します。

Option



■フックピン(フックスクリュー)の挿入・固定

茎状突起粉砕時に使用します。

計測方法は3通りから選択できます。

①フック用仮固定ピンの目盛りから計測します。

②デプスゲージ止め穴用を用いて計測します。

③フックピンゲージにて計測します。

HYBRIX-U



高度管理医療機器	類 別 ：医04 整形用品 一般的名称 ：体内固定用プレート 販売名 ：HYBRIX尺骨遠位端ハイブリッドロックングプレート JMDNコード ：35241003	製造販売承認番号:23000BZX00095000
高度管理医療機器	類 別 ：医04 整形用品 一般的名称 ：体内固定用ネジ 販売名 ：HYBRIX尺骨遠位端ハイブリッドロックングプレート JMDNコード ：16101003	製造販売承認番号:23000BZX00095000
高度管理医療機器	類 別 ：医04 整形用品 一般的名称 ：体内固定用ピン 販売名 ：HYBRIX尺骨遠位端ハイブリッドロックングプレート JMDNコード ：32854003	製造販売承認番号:23000BZX00095000

ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売技術部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストックビル鏡橋6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区鞆本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0045 広島市中区鶴見町3-19 板倉ビル4F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。