

手術台の修理をご依頼される前にもう一度下記の状況をご確認ください。

状態	考えらる原因	対策
電源が入らない	操作ボックスのコネクタを完全に差し込んでいない	コネクタを完全に差し込んでください
操作ボックスの機能スイッチを押しても作動しない	操作ボックスのコネクタを完全に差し込んでいない	コネクタを完全に差し込んでください
	機能スイッチと同時に E スイッチを押していない	E スイッチを押しながら機能スイッチを押してください
	保護回路が作動	約 7 分待ってから操作してください
コードレス操作ボックスで電源が入らない	バッテリーの容量が低下している	手術台を充電してください
	電源を入れない状態が 6 日以上続いた	バッテリー保護機能が働いています操作ボックスで電源を入れてください
	コードレス操作ボックスの電池が寿命	電池を交換してください
操作ボックスのブレーキスイッチを押しても作動しない	非常用ブレーキ解除ハンドルが UNLOCK の状態	非常用ブレーキ解除ハンドルを LOCK にしてください
コラムのパワーランプ赤が点滅している	非常用ブレーキ解除ハンドルが UNLOCK の状態	1. 非常用ブレーキ解除ハンドルを LOCK にしてください 2. 電源を切ってください 3. 再度、電源を入れてください
背板が水平位置より下に屈折できない	テーブルトップが中点位置より脚側にスライドしている	テーブルトップ中点を中点位置より頭側へスライドしてください
テーブルトップが中点位置より脚側にスライドできない	背板が水平位置より下にある	背板を水平位置より上に上げてください
フレックスがへの字に作動しない	テーブルトップが中点位置より脚側にスライドしている	テーブルトップ中点を中点位置より頭側へスライドしてください
コードレス操作ボックスが作動しない	コードレス操作ボックスの電池が寿命	電池を交換してください
	コードレス操作ボックスの設定が手術台の設定と異なる	コードレス操作ボックスと手術台の設定を合わせてください

手術台の機種により変わります。