

JCI推奨項目を全て網羅!

medela Professional Vacuum System (PVS)



Precious life, progressive care

JCI推奨項目*を全て網羅!

感染対策に優れた完全密封型吸引システム

わかりやすいセットアップ方法と優れたユーザビリティ

患者チューブ連結ポート

複数のライナー使用時に患者チューブ連結用を差込みます。ライナーには常に患者チューブ用のポートのみ、排気チューブと混乱しません。

患者チューブポート

アングルピースを取付けてからチューブを接続します。

フィルター収納部

逆流防止機能付バクテリアフィルターが内蔵されています。

アングルピース

多様な太さのチューブに対応するため先端の径を5段階にしています。

取手

キャニスターから外しやすく、吸引終了後にも持ち運びやすくします。

逆流防止弁

吸引中の逆流を防止します。


患者チューブポート用キャップ

吸引終了後、簡単に外してポートにはめられ、ライナーを完全密封できます。

環境に優しく安全に焼却できるポリエチレンとポリアミドの二層フォイルで抜群の耐久性と臭気制御機能を有します。
凝固剤入りと無しのタイプがあります。

キャニスターとの組合せ

キャニスターとライナーを容量ごとに色分けで管理。
同じ色で組合せるだけなのでシンプルで分かりやすく、
省スペースも見込めます。

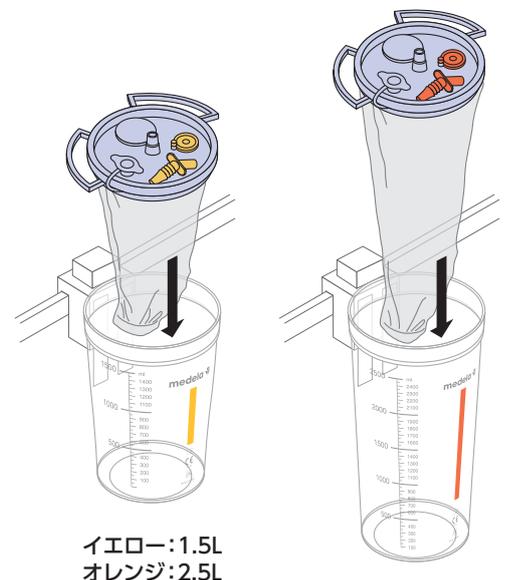

2種類のセットアップ方法〈切替式〉

チェンジオーバーバルブを使って、使用しないライナーセットボトルへの排液飛散を防止します。
ワンタッチ、ワンアクションで簡単に流動変更が可能です。



構成品

トrolley



08-251-00
08-251-01

ライナーセットボトル



08-252-00
08-252-03

ライナー



08-252-01
08-252-02
08-252-04
08-252-05

チェンジオーバーバルブ



08-251-02

チューブ・コネクター



08-254-03



08-254-05



08-255-02

2種類のセットアップ方法〈連結式〉

排気チューブはライナーセットボトルに、患者チューブはライナー上に繋ぐわかりやすい連結方法です。また、チューブ類が全てシステム上部から見渡せるので、万が一チューブが外れてもすぐに特定できます。



構成品

トrolley



08-251-00
08-251-01

ライナーセットボトル



08-252-00
08-252-03

ライナー



08-252-01
08-252-02
08-252-04
08-252-05

チューブ・コネクター



08-254-03



08-254-05



08-255-01



08-255-02

Line Up

▶ リューザブルシステム




	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出番号
①	08-253-00	4946329356175	リューザブルボトル 0.5L	I	13B1X00306N10317
②	08-253-01	4946329356182	リューザブルボトル蓋 0.5L用		
③	08-253-02	4946329356199	リューザブルボトル 1L		
④	08-253-03	4946329356205	リューザブルボトル 2L		
⑤	08-253-04	4946329356212	リューザブルボトル 3L		
⑥	08-253-05	4946329356229	リューザブルボトル蓋 1L・2L・3L用		
⑦	08-253-09	4946329356267	リューザブルボトル 5L		
⑧	08-253-10	4946329356274	リューザブルボトル蓋 5L用		

▶ ディスポーザブルシステム




	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出番号
①	08-252-00	4946329356113	ライナーセットボトル 1.5L用	I	13B1X00306N10315
②	08-252-01	4946329356120	ライナー 1.5L 40個入り		13B1X00306N10316
③	08-252-02	4946329356137	ライナー 1.5L 凝固剤入り 30個入り		13B1X00306N10316
④	08-252-03	4946329356144	ライナーセットボトル 2.5L用		13B1X00306N10315
⑤	08-252-04	4946329356151	ライナー 2.5L 40個入り		13B1X00306N10316
⑥	08-252-05	4946329356168	ライナー 2.5L 凝固剤入り 30個入り		13B1X00306N10316

▶ アクセサリー

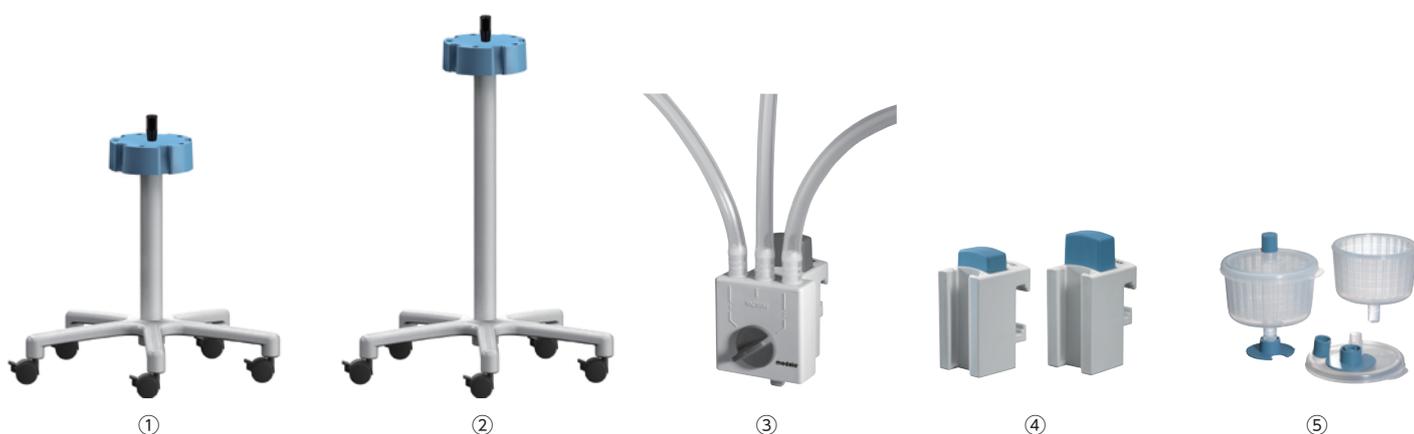


	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出番号
①	08-251-00	4946329356021	吸引トローリ-I	-	-
②	08-251-01	4946329356038	吸引トローリ-II	-	-
③	08-251-02	4946329356045	チェンジオーバーバルブ	I	13B1X00306N10318
④	08-251-03	4946329356052	クランプホルダー 5個入り	-	-
⑤	08-251-08	4946329356106	ディスプレイザブル採集カップ 10個入り	I	13B1X00306N10319

▶ 排気用チューブ・コネクタ

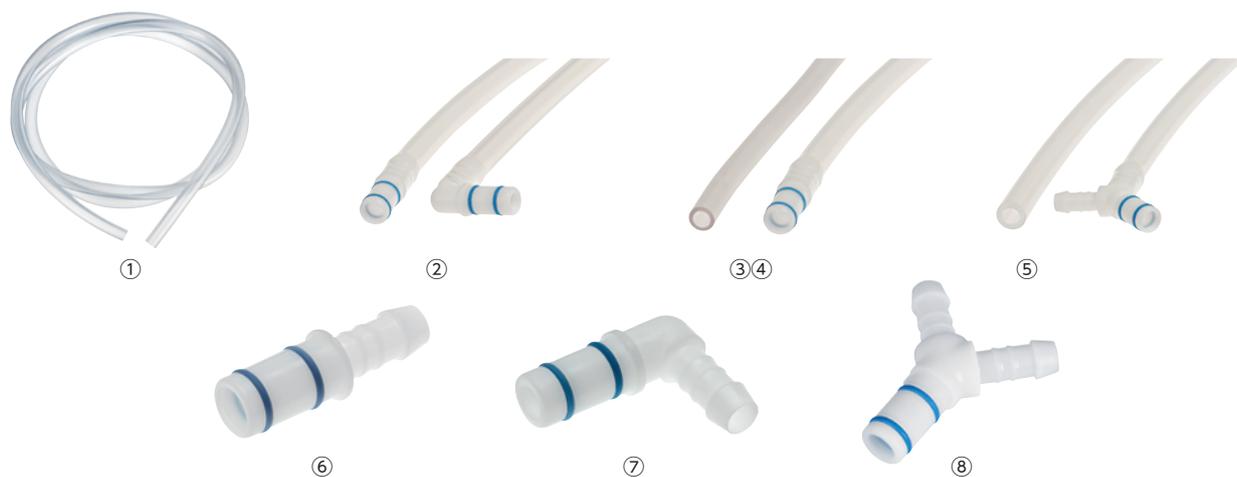

	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出番号
①	08-254-01	4946329356335	排気チューブ 2,500cm	I	13B1X00306N10318
②	08-254-02	4946329356342	排気チューブ 25cm Iコネクタ・Lコネクタ付き		
③	08-254-03	4946329356359	排気チューブ 25cm Iコネクタ付き		
④	08-254-04	4946329356366	排気チューブ 60cm Iコネクタ付き		
⑤	08-254-05	4946329356373	排気チューブ 連結用 25cm Yコネクタ付き		
⑥	08-254-06	4946329356380	Iコネクタ 排気チューブ用 10個入り		
⑦	08-254-07	4946329356397	Lコネクタ 排気チューブ用 10個入り		
⑧	08-254-08	4946329356403	Yコネクタ 排気チューブ用 10個入り		

▶ 排液用チューブ・コネクタ

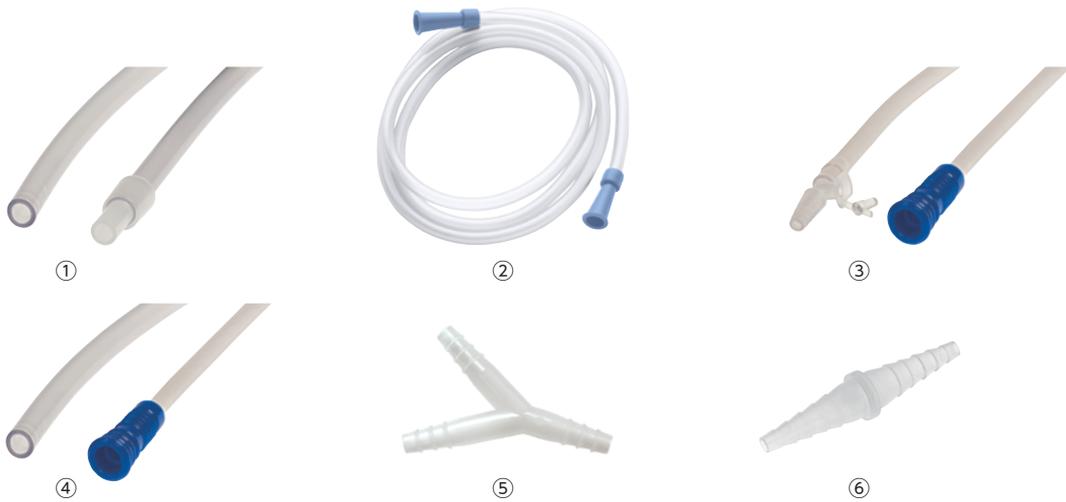

商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出番号
① 08-255-01	4946329356434	患者チューブ 連結用 34cm 100本入り	I	13B1X00306N10319
② 08-255-02	4946329356441	患者チューブB 150cm ファネル2個付き 30本入り		
③ 08-255-03	4946329356458	患者チューブB 180cm ファネル・フィンガーチップ付き 30本入り		
④ 08-255-04	4946329356465	患者チューブB 180cm ファネル付き 30本入り		
⑤ 08-255-09	4946329356564	Yコネクタ 患者チューブ用 10個入り		
⑥ 08-255-10	4946329356571	Lコネクタ 患者チューブ用 10個入り		

▶ フィルター



商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出番号
① 08-256-00	4946329356588	ディスポーザブル オーバーフロー・バクテリアフィルター メデラ型 10個入り	I	13B1X00306N10318
② 08-256-01	4946329356595	ディスポーザブル オーバーフロー・バクテリアフィルター テーパー型 10個入り		
③ 08-256-02	4946329356601	ディスポーザブル バクテリアフィルター メデラ型 10個入り		
④ 08-256-03	4946329356618	ディスポーザブル バクテリアフィルター テーパー型 10個入り		
⑤ 08-256-04	4946329356625	ディスポーザブル バクテリア・消臭フィルター テーパー型 10個入り		
⑥ 08-256-05	4946329356632	ディスポーザブル バクテリア・消臭フィルター メデラ型 10個入り		
⑦ 08-256-08	4946329374179	ディスポーザブル ウィルス・オーバーフローフィルター メデラ型 10個入り		
⑧ 08-256-09	4946329374186	ディスポーザブル ウィルス・オーバーフローフィルター テーパー型 10個入り		

一般医療機器	類 別：器32 医療用吸引器 一 般 的 名 称：吸引器用ボトル 販 売 名：ディスプレイブル排液回収システム専用ボトル J M D N コー ド：38476000	製造販売届出番号：13B1X00306N10315
一般医療機器 再使用禁止	類 別：器32 医療用吸引器 一 般 的 名 称：吸引器用キャニスタ 販 売 名：ディスプレイブル排液回収システム J M D N コー ド：34858000	製造販売届出番号：13B1X00306N10316
一般医療機器	類 別：器32 医療用吸引器 一 般 的 名 称：吸引器用ボトル 販 売 名：リユースブル排液回収システム J M D N コー ド：38476000	製造販売届出番号：13B1X00306N10317
一般医療機器	類 別：器51 医療用嘴管及び体液誘導管 一 般 的 名 称：吸引チューブ 販 売 名：排気チューブシステム J M D N コー ド：16779000	製造販売届出番号：13B1X00306N10318
一般医療機器 再使用禁止	類 別：器51 医療用嘴管及び体液誘導管 一 般 的 名 称：吸引チューブ 販 売 名：患者チューブシステム J M D N コー ド：16779000	製造販売届出番号：13B1X00306N10319

製造販売業者 **ミズホ株式会社**
http://www.mizuho.co.jp

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売技術部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストックビル鏡橋6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市中区千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル13F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13



●事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。

●定期点検および術前・術後の点検を行ってください。

●アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。