




MOT-VS700UIj MOT-VS700UKIj

ミズホの技術とユーザーの声を集結させ

Features

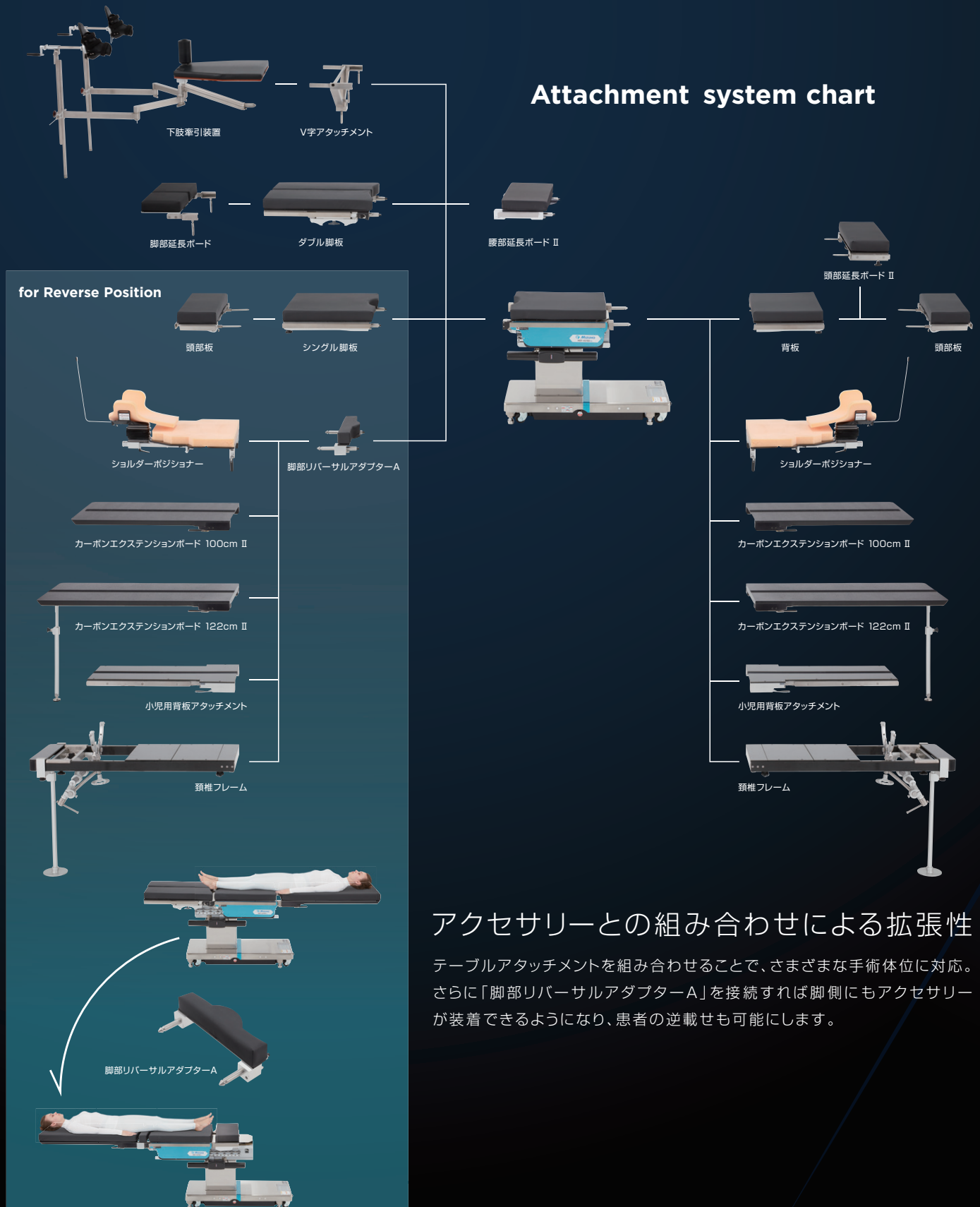

たVSシリーズのハイスペックモデル。

MOT-VS700UIj
MOT-VS700UKIj





多様な手術体位に対応する作動レンジ

汎用手術台として必要な機能を装備し、広い可動範囲で、ロボット手術や内視鏡手術などのさまざまな体位にも対応します。

視認性の高い液晶コントローラー

スライド幅や昇降域、角度といったポジショニングが液晶コントローラーにデジタル表示。メモリー機能も搭載しており、保存した手術体位が容易に再現できます。

Bluetooth+赤外線通信機能を搭載

ワイヤレスで双方向のデータ通信を可能とするBluetooth搭載。赤外線通信またはBluetooth通信のいずれかで、手術台操作をコードレスで行えます。



Function

広範囲なイメージングエリアを実現


頭・脚側のスライド幅を拡張し、これまで透視しづらかった部位のイメージング操作もスムーズに行えます。

脚板の電動化により 操作が滑らかに

脚板部を電動にしたことで、左右それぞれの脚板角度がスムーズかつ正確に設定できます。また、シングル脚板（オプション）との交換も可能です。



Slide 250mm

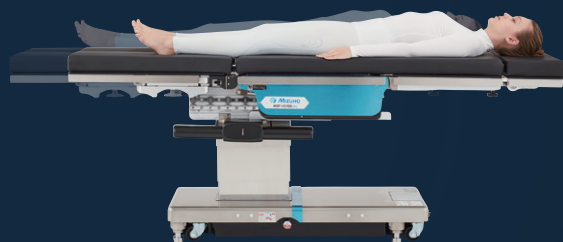

Slide 415mm



昇降：**450kg**
作動荷重：**360kg**

ヘビーウエイト対応の荷重設計


体格の良いヘビーウエイトな患者にも対応できる十分な作動荷重を実現。安定した手術環境を提供します。




さまざまな安全機能を搭載

手術に携わる医療従事者の声を反映させた安全機能を標準装備。多彩な機能で患者の安心・安全をサポートします。


- ① タッチパネル式予備スイッチ
- ② ブレーキ解除ハンドル
- ③ 電動4点ブレーキおよびブレーキ固定ランプ
- ④ 緊急停止スイッチ
- ⑤ 転倒検知システム

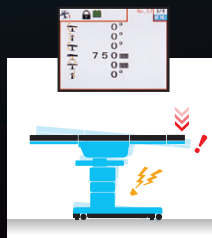


Option

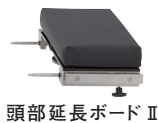

脚部リバーサルアダプター-A

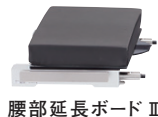

腰部延長ボード II

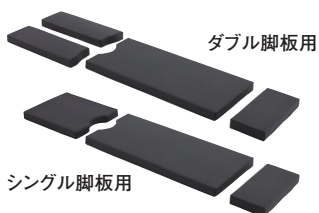

ダブル脚板用

シングル脚板用



固定式カセット格納枠



●カセット格納枠(固定式)

| 商品コード | JANコード | 商品名 | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| ●リバーサルアダプター | | | |
| 08-077-70 | 4946329365962 | 脚部リバーサルアダプター-A | |
| 18-097-00 | 4946329378122 | デジタルカセット格納枠 脚部リバーサルアダプター | |
| 18-042-90 | 4946329378139 | ミズホオリジナルマットレス 脚部リバーサルアダプター | |
| ●頭部延長ボード II | | | |
| 08-075-90 | 4946329358544 | 頭部延長ボード240mm II 本体 | |
| 08-083-02 | 4946329330540 | 固定式カセット格納枠 頭部延長ボード 240mm用 | |
| 08-083-22 | 4946329330618 | デジタルカセット格納枠 頭部延長ボード 240mm用 | |
| 08-075-29 | 4946329218114 | ミズホオリジナルマットレス 240mmタイプ | |
| ●腰部延長ボード II | | | |
| 08-075-52 | 4946329373301 | 腰部延長ボード300mm II 本体 | |
| 08-083-00 | 4946329330526 | 固定式カセット格納枠 腰部延長ボード 300mm用 | |
| 08-083-20 | 4946329330595 | デジタルカセット格納枠 腰部延長ボード 300mm用 | |
| 08-083-60 | 4946329330717 | ミズホオリジナルマットレス 腰部延長ボード 300mm用 | |
| ●マットレス VS700UIj / VS700UKIj 共用 | | | |
| ダブル脚板用 | 18-042-00 | 4946329370003 | ミズホオリジナルマットレス 頭板 タイプA |
| | 18-042-40 | 4946329370034 | ミズホオリジナルマットレス 背板・腰板 タイプA |
| | 18-042-50 | 4946329370065 | ミズホオリジナルマットレス ダブル脚板 タイプA |
| シングル脚板用 | 18-042-00 | 4946329370003 | ミズホオリジナルマットレス 頭板 タイプA |
| | 18-042-40 | 4946329370034 | ミズホオリジナルマットレス 背板・腰板 タイプA |
| | 18-042-60 | 4946329370041 | ミズホオリジナルマットレス シングル脚板 タイプA |
| VS700UIj ダブル脚板用 | 18-090-00 | 4946329370089 | 固定式カセット格納枠 頭板 タイプA |
| | 18-090-10 | 4946329369830 | 固定式カセット格納枠 背板 タイプA |
| | 18-090-20 | 4946329369847 | 固定式カセット格納枠 腰板 タイプA |
| | 18-090-50 | 4946329369878 | 固定式カセット格納枠 ダブル脚板 タイプA |
| VS700UIj シングル脚板用 | 18-090-00 | 4946329370089 | 固定式カセット格納枠 頭板 タイプA |
| | 18-090-10 | 4946329369830 | 固定式カセット格納枠 背板 タイプA |
| | 18-090-20 | 4946329369847 | 固定式カセット格納枠 腰板 タイプA |
| | 18-090-60 | 4946329369854 | 固定式カセット格納枠 シングル脚板 タイプA |
| VS700UKIj ダブル脚板用 | 18-090-00 | 4946329370089 | 固定式カセット格納枠 頭板 タイプA |
| | 18-092-10 | 4946329369892 | 固定式カセット格納枠 背板K タイプA |
| | 18-092-20 | 4946329369908 | 固定式カセット格納枠 腰板K タイプA |
| | 18-090-50 | 4946329369878 | 固定式カセット格納枠 ダブル脚板 タイプA |
| VS700UKIj シングル脚板用 | 18-090-00 | 4946329370089 | 固定式カセット格納枠 頭板 タイプA |
| | 18-092-10 | 4946329369892 | 固定式カセット格納枠 背板K タイプA |
| | 18-092-20 | 4946329369908 | 固定式カセット格納枠 腰板K タイプA |
| | 18-090-60 | 4946329369854 | 固定式カセット格納枠 シングル脚板 タイプA |
| ●カセット格納枠(デジタル式) | | | |
| VS700UIj ダブル脚板用 | 18-091-00 | 4946329369922 | デジタルカセット格納枠 頭板タイプA |
| | 18-091-10 | 4946329369939 | デジタルカセット格納枠 背板タイプA |
| | 18-091-20 | 4946329369946 | デジタルカセット格納枠 腰板タイプA |
| | 18-090-50 | 4946329369878 | 固定式カセット格納枠 ダブル脚板 タイプA |
| VS700UIj シングル脚板用 | 18-091-00 | 4946329369922 | デジタルカセット格納枠 頭板タイプA |
| | 18-091-10 | 4946329369939 | デジタルカセット格納枠 背板タイプA |
| | 18-091-20 | 4946329369946 | デジタルカセット格納枠 腰板タイプA |
| | 18-091-60 | 4946329369953 | デジタルカセット格納枠 シングル脚板 タイプA |
| VS700UKIj ダブル脚板用 | 18-091-00 | 4946329369922 | デジタルカセット格納枠 頭板 タイプA |
| | 18-093-10 | 4946329369977 | デジタルカセット格納枠 背板K タイプA |
| | 18-093-20 | 4946329369984 | デジタルカセット格納枠 腰板K タイプA |
| | 18-090-50 | 4946329369878 | 固定式カセット格納枠 ダブル脚板 タイプA |
| VS700UKIj シングル脚板用 | 18-091-00 | 4946329369922 | デジタルカセット格納枠 頭板 タイプA |
| | 18-093-10 | 4946329369977 | デジタルカセット格納枠 背板K タイプA |
| | 18-093-20 | 4946329369984 | デジタルカセット格納枠 腰板K タイプA |
| | 18-091-60 | 4946329369953 | デジタルカセット格納枠 シングル脚板 タイプA |



デジタルカセット格納枠



手術台周辺機器カタログ

各科の要望に幅広くお応えできる、ミズホ製オリジナルの手術台周辺機器を豊富に掲載したカタログです。詳しくは各営業所および購入店までお問い合わせください。

MOT-VS700Uij

MOT-VS700UKij

Specification

※詳細仕様については弊社営業担当までお問い合わせください。

| | | |
|--------------------|---|---------------------------------|
| 商品名 | MOT-VS700Uij | MOT-VS700UKij |
| 商品コード | 18-700-10 | 18-720-10 |
| JANコード | 494632932282 | 4946329322927 |
| 販売名 | 手術台 MOT-VS700Uij | |
| 製造販売届出番号 | 13B1X00306N10314 | |
| 類別名 | 機械器具(01)手術台及び治療台 | |
| 一般的名称 | 汎用電動式手術台 | |
| JMDNコード | 36867020 | |
| クラス分類 | I 特定保守管理医療機器 | |
| テーブルトップ寸法 | 【ダブル脚板装着時】 2124mm(長)×500mm(幅) 【シングル脚板装着時】 2005mm(長)×500mm(幅) | |
| ベース寸法 | 1134mm(長)×483mm(幅) | |
| 質量 | 390kg(ダブル脚板付) 383kg(シングル脚板付) | 400kg(ダブル脚板付) 393kg(シングル脚板付) |
| 定格電源電圧 | AC100V-240V | |
| 定格電源周波数 | 50-60Hz | |
| 電源入力 | 600VA | |
| バッテリー電源電圧 | DC24V | |
| 昇降範囲(電動) | 最高位1000mm 最低位520mm | |
| 縦転角度(電動) | 頭上がり30° 頭下がり40° | |
| 横転角度(電動) | 右下がり35° 左下がり35° | |
| 背板屈折角度(電動) | 上がり90° 下がり40° | |
| 脚板屈折角度(電動) | 上がり25° 下がり90° | |
| 脚板展開角度(手動)※ダブル脚板のみ | 第一関節:42° 第二関節:42° | |
| スライド量(電動) | 頭方向250mm 脚方向415mm | |
| フレックス・リフレックス(電動) | 有 | |
| 挙上器(電動) | — | 有 最高位150mm |
| 自動水平復帰(電動) | 縦転／横転／背板屈折／脚板屈折／フレックス／ビーチチェア／挙上(UKijのみ) | |
| 頭部板屈折角度(手動) | 上がり60° 下がり90° | |
| 構成品 | 本体、ミズホオリジナルマットレス、電源コード、操作ボックス各1 ※脚板は1枚式か2枚式をオプションで選択 | |

外寸図 ※図はMOT-VS700Uij


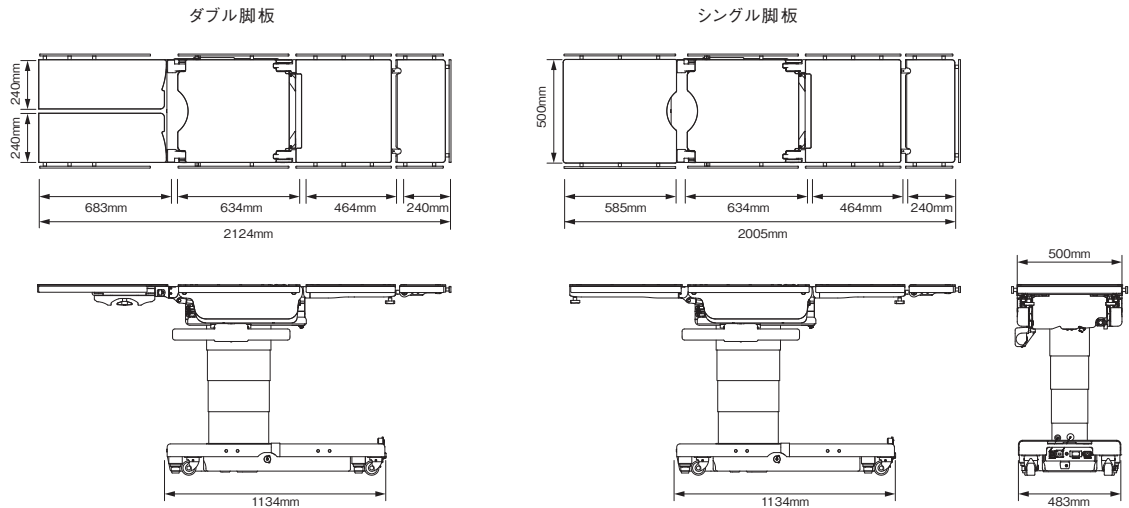


Table Function



MOT-VS700UKijのみ

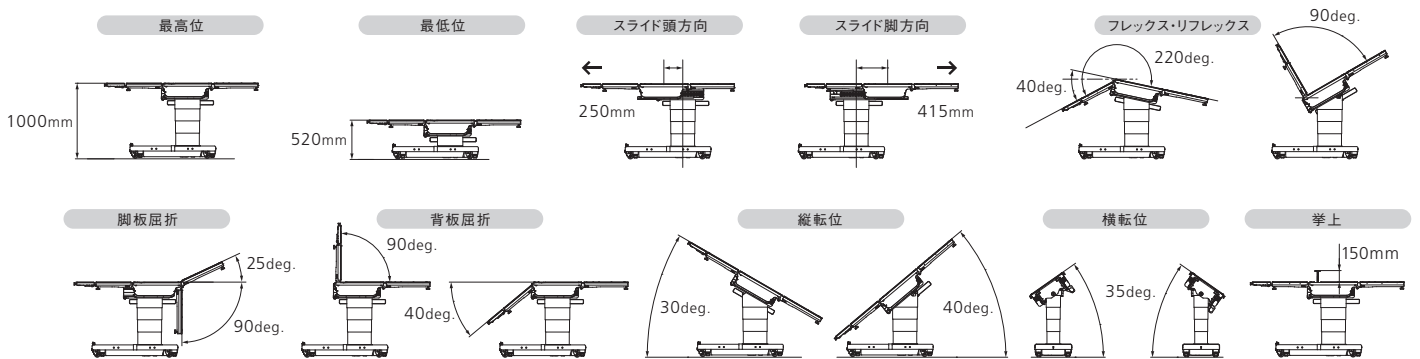

MOT-VS700Uij MOT-VS700UKij

手術台の保守・点検サービス「Mizuho Care」のご案内

ミズホではお客様の手術台をより良い状態でご使用いただくために、保守点検サービス「Mizuho Care」をご提供しております。詳しくは弊社営業所または購入代理店までお問い合わせください。

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売技術部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3813-5068

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストークビル鏡橋6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル13F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

2202-3000-BR-001-2202