

Yコネクタホルダーボード

Y-Connector Holder Board



ディスプレイザブル

特許取得済み

開発指導：りんくう総合医療センター 脳神経外科 出原 誠 先生 / 放射線科 行 正剛 技師

脳血管内治療に使用するYコネクタを固定するボードで、術者の操作をサポート。
φ5.0～φ8.0の範囲でYコネクタを把持することが可能です。

Before

従来では術者がコイルの挿入、助手がマイクロカテーテルの操作を行う方法をとることがあり、2人がタイミングを合わせるのが難しい場合がありました。

また、術者1名での操作の場合は右手でYコネクタを握りながらワイヤーの操作を行うため繊細な操作をするには高い熟練度を必要とし、どちらの方法も難易度が高いという課題がありました。

2名による操作



1名による操作




After

YコネクタホルダーボードでYコネクタを固定することにより、術者の右手のみで安定した繊細なワイヤー操作ができ、それによって左手はマイクロカテーテルの操作に集中することができます。術者一人で、マイクロカテーテルとワイヤーの操作を同時に容易に行うことができるようになりました。






使用例

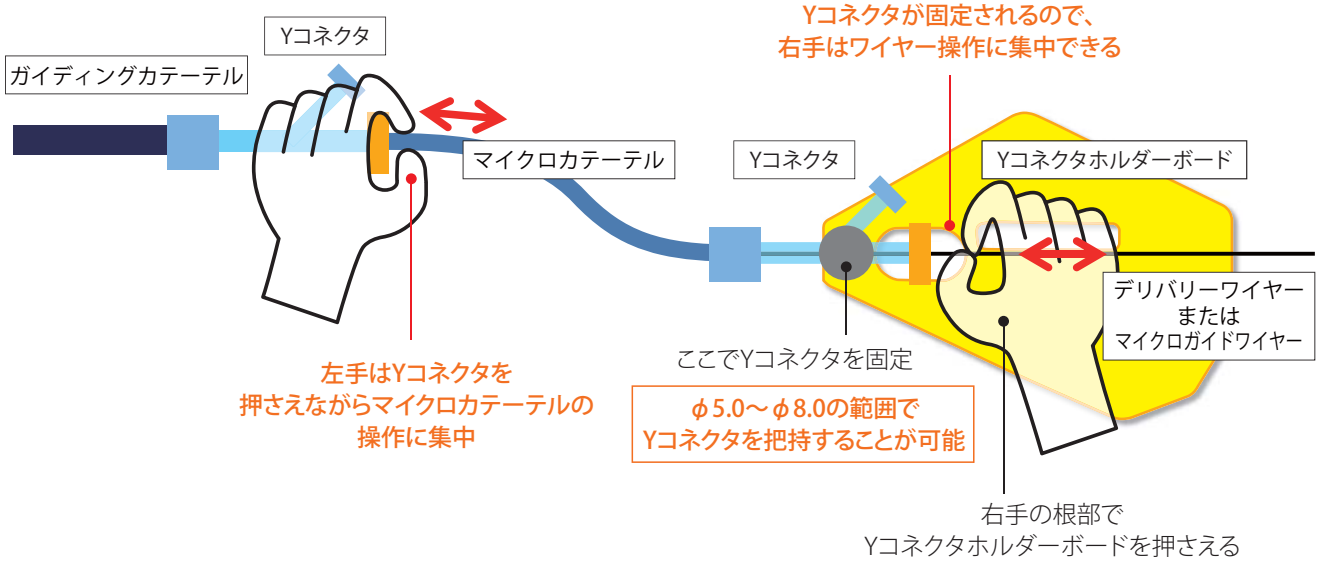

商品コード	JANコード	商品名	仕様
07-991-01	4946329310382	Yコネクタホルダーボード	ディスプレイ 滅菌済

外寸図

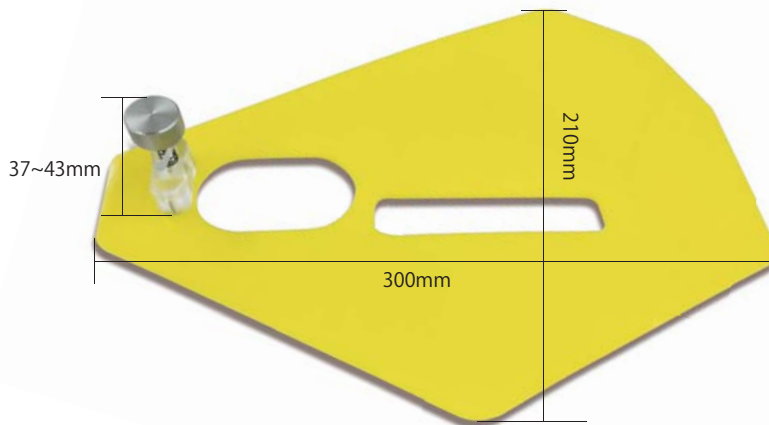

ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

【営業拠点】

北海道 TEL 011-716-4731 東北 TEL 022-227-1688
 新潟 TEL 025-229-5458 北関東 TEL 03-3815-3193
 東海 TEL 052-732-7130 関西 TEL 06-6444-3840
 中国 TEL 082-241-8826 九州 TEL 092-431-5022

【関東圏販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【本社】

〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
 手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068
 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

【テクニカルサービスセンター】

〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13
 訪問修理受付 TEL 043-481-3367
 お預り修理受付 TEL 043-481-3368

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。



注意

- 本品は、1回限りの使用とし、再使用、再処理、又は再滅菌は行わないでください。
- 使用前に滅菌包装に破損が無いが確認し、破損している場合は使用しないでください。
- 使用後は、病院、行政及び地方自治体の定める規制に従って、製品及び包装を廃棄してください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。