



**MOT-VS500DKj**  
**MOT-VS500SKj**

汎用手術台に必要な機能を追求した  
スタンダードモデル。



# MOT-VS500DKj MOT-VS500SKj

「MOT-VS500」は、さまざまな臨床現場で多様な能力を発揮する  
汎用性の高いスタンダードモデルの手術台です。

# Attachment system chart



MOT-VS500DK



MOT-VS500SK

V字アタッチメント

下肢牽引装置

腰部延長ボード

2枚式脚板

脚部延長ボード

脚部リバーサルアダプターC

カーボンエクステンションボード 100cm II

カーボンエクステンションボード 122cm II

小児用背板アタッチメント

頸椎フレーム

for Reverse Position

頭部板

頭部延長ボード II

V字アタッチメント

下肢牽引装置

1枚式脚板

頭部板

カーボンエクステンションボード 100cm II

カーボンエクステンションボード 122cm II

小児用背板アタッチメント


頸椎フレーム

for Reverse Position

# Function



MOT-VS500DK

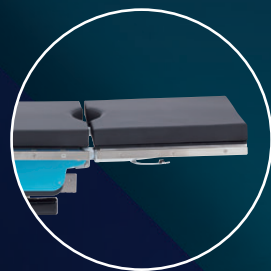

MOT-VS500SK

## 2種類の脚板方式で 用途に応じた体位に対応


DKモデルは手動式による2枚脚板、SKモデルは電動式による1枚脚板を採用。用途に応じたモデルを選択できます。

## 逆載せも可能にする優れた拡張性

テーブルアタッチメントを組み合わせることで、さまざまな手術体位を実現。

DKモデルは「脚部リバーサルアダプターC」を接続することで、またSKモデルはピンジョイント部の採用により、脚側にもアクセサリが装着できるようになり、患者の逆載せも可能にします。

MOT-VS500DK

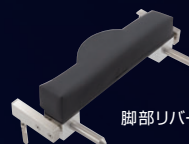


脚部リバーサルアダプターC

MOT-VS500SK





# 53cm Total Slide Stroke

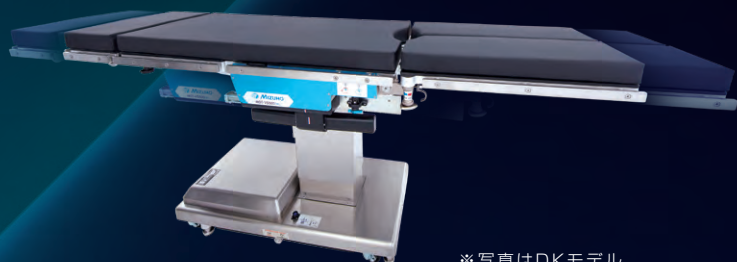

※写真はDKモデル

## 広範囲な イメージングエリアを実現

頭側、脚側ともにスライド幅を拡張し、これまで透視しづらかった部位のイメージング操作もスムーズに行えます。

DK/頭方向スライド 310mm  
SK/頭方向スライド 280mm



DK/脚方向スライド 220mm  
SK/脚方向スライド 250mm



※写真はDKモデル

昇降: 250mm  
作動荷重: 250kg



## ヘビーウエイト対応の荷重設計

体格の良いヘビーウエイトな患者にも対応できる十分な作動荷重を実現。安定した手術環境を提供します。

## 多様な手術体位に 対応する作動レンジ

GSTテーブルとしてハイスpekな機能を装備。広い可動範囲で、ロボット手術や内視鏡手術などのさまざまな体位でも使用できます。



## さまざまな安全機能を搭載

手術に携わる医療従事者の声を反映させた安全機能を標準装備。

- ① 本体予備コントローラー
- ② ブレーキ解除レバー
- ③ 電動4点ブレーキ
- ④ 緊急停止スイッチ
- ⑤ バッテリーインジケーター



Option

|  | 商品コード | JANコード | 商品名 |
|--|-------|--------|-----|
|--|-------|--------|-----|

|            |                                                           |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| リバーサルアダプター | 販売名:脚部リバーサルアダプター／製造販売届出番号:13B1X00306N10332／一般的名称:手術台アクセサリ |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------|--|--|


脚部リバーサルアダプターC



|           |               |                            |
|-----------|---------------|----------------------------|
| 08-077-50 | 4946329366020 | 脚部リバーサルアダプターC              |
| 18-097-00 | 4946329378122 | デジタルカセット格納枠 脚部リバーサルアダプター   |
| 18-042-90 | 4946329378139 | ミズホオリジナルマットレス 脚部リバーサルアダプター |

|          |                                                      |  |  |
|----------|------------------------------------------------------|--|--|
| 頭部延長ボードⅡ | 販売名:頭部延長ボード／製造販売届出番号:13B1X00306N10026／一般的名称:手術台アクセサリ |  |  |
|----------|------------------------------------------------------|--|--|

頭部延長ボードⅡ

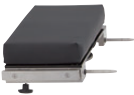

|           |               |                             |
|-----------|---------------|-----------------------------|
| 08-075-90 | 4946329358544 | 頭部延長ボード240mmⅡ 本体            |
| 08-083-02 | 4946329330540 | 固定式カセット格納枠 頭部延長ボード 240mm用   |
| 18-042-01 | 4946329385502 | ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 頭部板タイプA |


|         |                                                             |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| 腰部延長ボード | 販売名:腰部延長ボード(350mm)／製造販売届出番号:13B1X00306N10120／一般的名称:手術台アクセサリ |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------|--|--|

腰部延長ボード



|           |               |                                 |
|-----------|---------------|---------------------------------|
| 08-075-36 | 4946329177046 | 腰部延長ボード350mm 本体                 |
| 08-083-01 | 4946329330533 | 固定式カセット格納枠 腰部延長ボード 350mm用       |
| 08-083-21 | 4946329330601 | デジタルカセット格納枠 腰部延長ボード 350mm用      |
| 18-042-83 | 4946329395440 | ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 腰部延長板 350mm |

|       |                                                                                                                                |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| マットレス | 販売名:手術台 MOT-VS500DKj／製造販売届出番号:13B1X00306N10313／一般的名称:汎用電動式手術台<br>販売名:手術台 MOT-VS500SKj／製造販売届出番号:13B1X00306N10325／一般的名称:汎用電動式手術台 |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

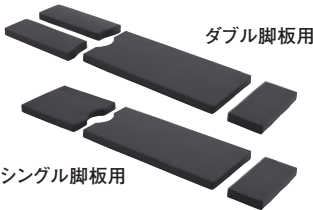


|          |           |               |                                 |
|----------|-----------|---------------|---------------------------------|
| VS500DK用 | 18-042-01 | 4946329385502 | ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 頭部板 タイプA    |
|          | 18-042-42 | 4946329385540 | ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 背板・腰板 タイプA  |
|          | 18-042-53 | 4946329385588 | ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス ダブル脚板 タイプB  |
| VS500SK用 | 18-042-01 | 4946329385502 | ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 頭部板 タイプA    |
|          | 18-042-42 | 4946329385540 | ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 背板・腰板 タイプA  |
|          | 18-042-61 | 4946329385564 | ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス シングル脚板 タイプA |

|              |                                                                |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| カセット格納枠(固定式) | 販売名:X線撮影用カセット格納枠<固定式>／製造販売届出番号:13B1X00306N10199／一般的名称:手術台アクセサリ |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--|--|



|          |           |               |                           |
|----------|-----------|---------------|---------------------------|
| VS500DK用 | 18-090-00 | 4946329370089 | 固定式カセット格納枠 頭板 タイプA        |
|          | 18-092-10 | 4946329369892 | 固定式カセット格納枠 背板K タイプA       |
|          | 18-092-21 | 4946329369915 | 固定式カセット格納枠 腰板K タイプB       |
|          | 18-090-51 | 4946329369885 | 固定式カセット格納枠 ダブル脚板 タイプB     |
| VS500SK用 | 18-090-00 | 4946329370089 | 固定式カセット格納枠 頭板 タイプA        |
|          | 18-092-10 | 4946329369892 | 固定式カセット格納枠 背板K タイプA       |
|          | 18-092-21 | 4946329369915 | 固定式カセット格納枠 腰板K タイプB       |
|          | 18-090-61 | 4946329369861 | 固定式カセット格納枠 シングル脚板 タイプA-II |

|                |                                                                |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| カセット格納枠(デジタル式) | 販売名:X線撮影用カセット格納枠<固定式>／製造販売届出番号:13B1X00306N10199／一般的名称:手術台アクセサリ |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--|--|

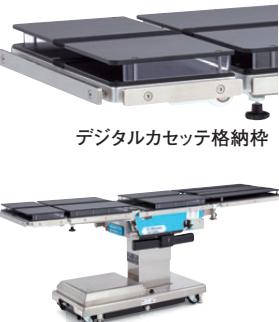

|          |           |               |                            |
|----------|-----------|---------------|----------------------------|
| VS500DK用 | 18-091-00 | 4946329369922 | デジタルカセット格納枠 頭板 タイプA        |
|          | 18-093-10 | 4946329369977 | デジタルカセット格納枠 背板K タイプA       |
|          | 18-093-21 | 4946329369991 | デジタルカセット格納枠 腰板K タイプB       |
|          | 18-090-51 | 4946329369885 | 固定式カセット格納枠 ダブル脚板 タイプB      |
| VS500SK用 | 18-091-00 | 4946329369922 | デジタルカセット格納枠 頭板 タイプA        |
|          | 18-093-10 | 4946329369977 | デジタルカセット格納枠 背板K タイプA       |
|          | 18-093-21 | 4946329369991 | デジタルカセット格納枠 腰板K タイプB       |
|          | 18-091-61 | 4946329369960 | デジタルカセット格納枠 シングル脚板 タイプA-II |

# MOT-VS500

## Specification

※詳細仕様については弊社営業担当までお問い合わせください。


### MOT-VS500DK

### MOT-VS500SK


|                  |                                     |                 |                                     |                 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 商品名              | MOT-VS500DKj                        | MOT-VS500DKj-IF | MOT-VS500SKj                        | MOT-VS500SKj-IF |
| 商品コード            | 18-500-10                           | 18-505-10       | 18-510-10                           | 18-515-10       |
| JANコード           | 4946329353815                       | 4946329369786   | 4946329358490                       | 4946329369748   |
| 販売名              | 手術台 MOT-VS500DKj                    |                 | 手術台 MOT-VS500SKj                    |                 |
| 製造販売届出番号         | 13B1X00306N10313                    |                 | 13B1X00306N10325                    |                 |
| 類別名              | 機械器具(01)手術台及び治療台                    |                 | 機械器具(01)手術台及び治療台                    |                 |
| 一般の名称            | 汎用電動式手術台                            |                 | 汎用電動式手術台                            |                 |
| JMDNコード          | 36867020                            |                 | 36867020                            |                 |
| クラス分類            | I 特定保守管理医療機器                        |                 | I 特定保守管理医療機器                        |                 |
| テーブルトップ寸法        | 2133mm(長)×500mm(幅)                  |                 | 2004mm(長)×500mm(幅)                  |                 |
| ベース寸法            | 1033mm(長)×483mm(幅)                  |                 | 1033mm(長)×483mm(幅)                  |                 |
| 質量               | 360kg                               |                 | 370kg                               |                 |
| 定格電源電圧           | AC100V-240V                         |                 | AC100V-240V                         |                 |
| 定格電源周波数          | 50-60Hz                             |                 | 50-60Hz                             |                 |
| 電源入力             | 400VA                               |                 | 400VA                               |                 |
| バッテリー電源電圧        | DC24V                               |                 | DC24V                               |                 |
| 昇降範囲(電動)         | 最高位1090mm 最低位635mm                  |                 | 最高位1090mm 最低位635mm                  |                 |
| 縦転角度(電動)         | 頭上がり30° 頭下がり30°                     |                 | 頭上がり30° 頭下がり30°                     |                 |
| 横転角度(電動)         | 右下がり20° 左下がり20°                     |                 | 右下がり20° 左下がり20°                     |                 |
| 背板屈折角度(電動)       | 上がり90° 下がり40°                       |                 | 上がり90° 下がり40°                       |                 |
| スライド量(電動)        | 頭方向310mm 脚方向220mm                   |                 | 頭方向280mm 脚方向250mm                   |                 |
| 挙上器(電動)          | 最高位150mm                            |                 | 最高位150mm                            |                 |
| フレックス・リフレックス(電動) | 有                                   |                 | 有                                   |                 |
| 自動水平復帰(電動)       | 縦転／横転／背板屈折／フレックス・リフレックス／挙上          |                 | 縦転／横転／背板屈折／脚板屈折／フレックス・リフレックス／挙上     |                 |
| 頭部板屈折角度(手動)      | 上がり60° 下がり90°                       |                 | 上がり60° 下がり90°                       |                 |
| 脚板方式             | 2枚板                                 |                 | 1枚板                                 |                 |
| 脚板屈折角度           | 下がり90°(手動)                          |                 | 下がり100°(電動)                         |                 |
| 脚板展開角度           | 左右各90°                              |                 | —                                   |                 |
| 赤外線ワイヤレスコントローラー  | 不可                                  | 可               | 不可                                  | 可               |
| 構成               | 本体(脚板2枚板付)、難燃・防水性マットレス、電源コード、操作ボックス |                 | 本体(脚板1枚板付)、難燃・防水性マットレス、電源コード、操作ボックス |                 |

## 外寸図


### MOT-VS500DK

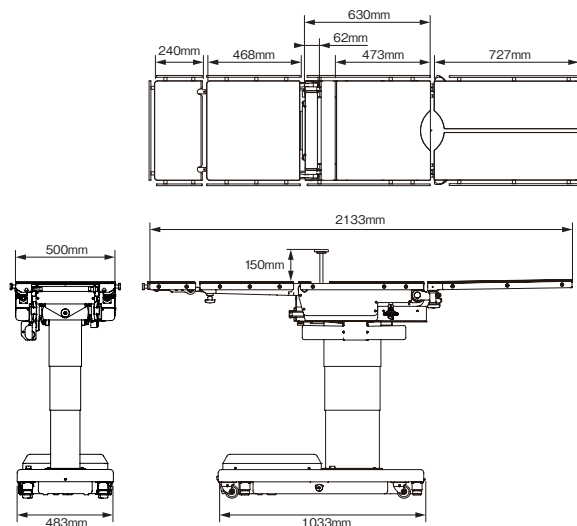

### MOT-VS500SK

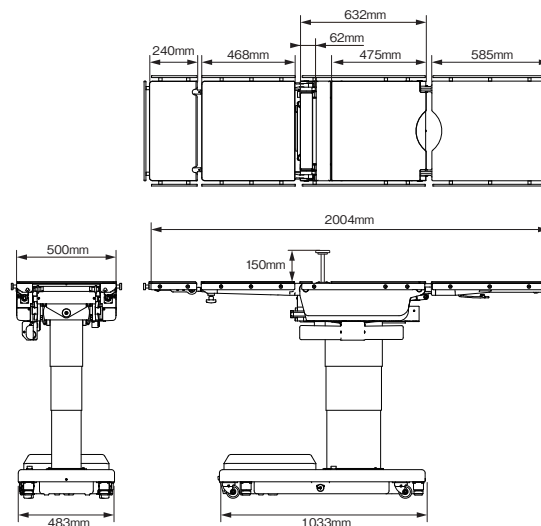

## Table Function

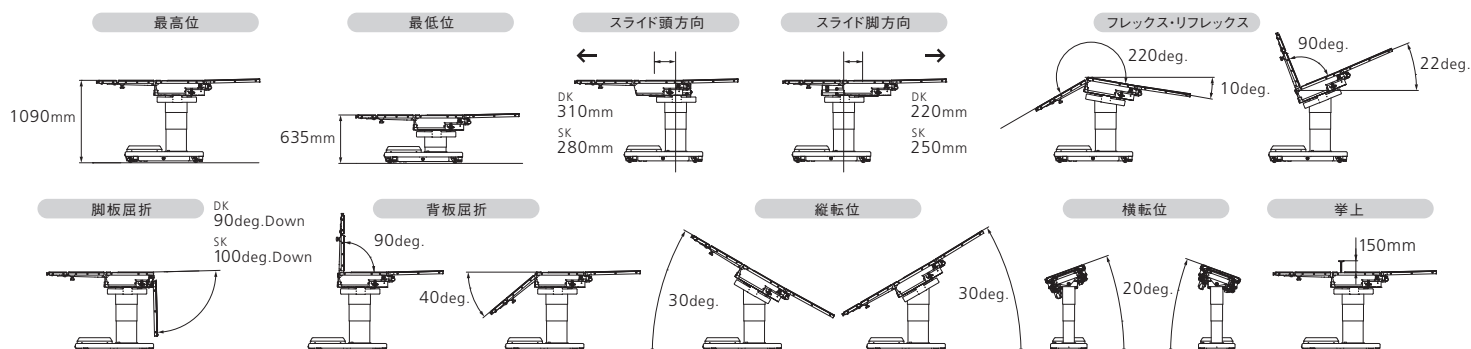



# MOT-VS500DKj MOT-VS500SKj

## 手術台の保守・点検サービス「Mizuho Care」のご案内

ミズホではお客様の手術台をより良い状態でご使用いただくために、保守点検サービス「Mizuho Care」をご提供しております。詳しくは弊社営業所または購入代理店までお問い合わせください。

## ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

### 【営業拠点】

●北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803  
●東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698  
●新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684  
●北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280  
●東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131  
●関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860  
●中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836  
●九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

